

# VITTRA APS UNIQUE

Composito a colorazione universale capace di imitare la tonalità del dente.

## UNA TONALITÀ PER TUTTE LE COLORAZIONI



# IL VERO EFFETTO CAMALEONTE

Le proprietà ottiche di Vittra APS Unique sono definite dopo la polimerizzazione. Grazie alle caratteristiche di copiatura cromatica, l'effetto camaleonte si verifica durante il processo di polimerizzazione quando il composito cattura e riflette la tonalità del substrato dentale.

Prima della polimerizzazione, la tonalità a contrasto e quella più opaca del composito agevolano la visualizzazione e il controllo della procedura di restauro.


I riempitivi, l'opacità ben equilibrata e l'estetica della tecnologia APS sono fondamentali per ottenere una **perfetta imitazione**.

Tecnologia

**APS**

ADVANCED  
POLYMERIZATION  
SYSTEM


**Tempo di lavorazione più lungo  
anche sotto il riflettore.**

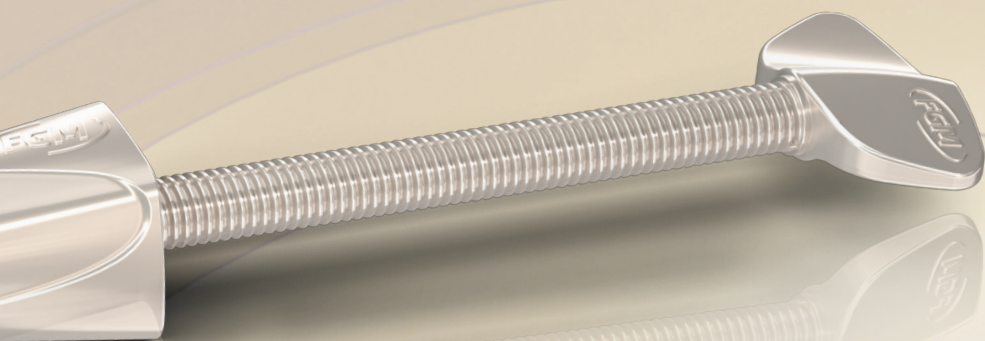

Composito a  
**COLORAZIONE  
UNIVERSALE**

**BPA  
FREE**

# PRIMA E DOPO LA POLIMERIZZAZIONE

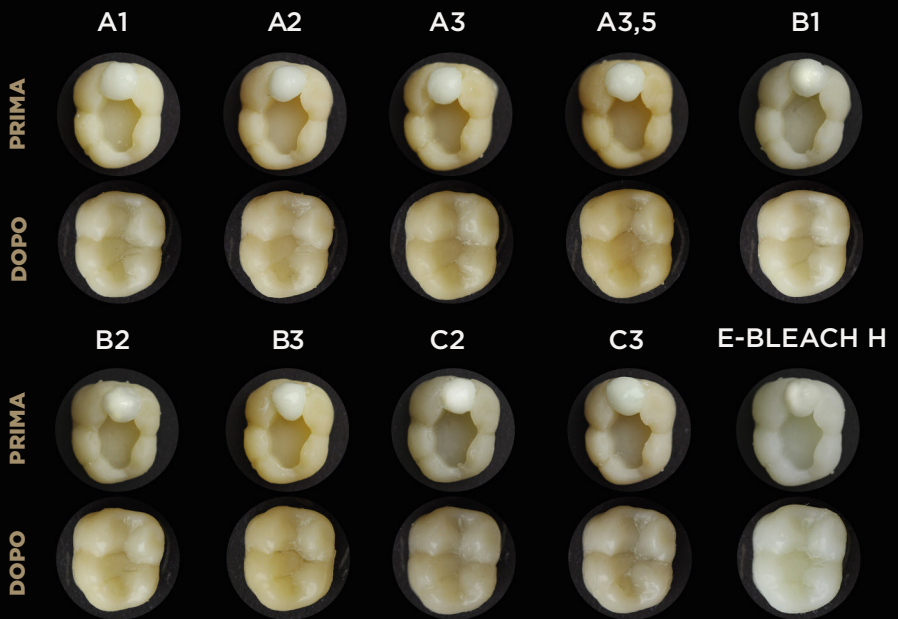

- Colorazione universale: un'unica tonalità;
- Da Bleach a D4 con un solo composito;
- Nella maggior parte dei casi non necessita di stratificazione;
- Semplice tecnica incrementale che non richiede l'uso di gradi di opacità/traslucidità differenti;
- Radiopaco.

COMPOSITO PER  
TUTTE LE TONALITÀ  
DA BLEACH A D4.



Nessun selezione della tonalità.

Minori giacenze.


Maggiore produttività.

Lucentezza e lucidatura eccellenti.



## INDICAZIONI D'USO


- Denti decidui e permanenti: restauri diretti dei denti anteriori e posteriori (Classe I, II, III, IV, V e VI).

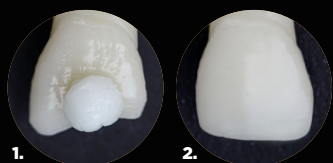

1.

2.

*Denti anteriori*

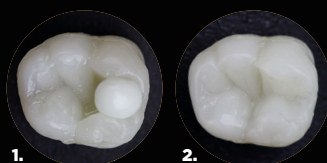


1.

2.

*Denti posteriori*

- Per le cavità di classe I, II, V e VI, in caso di pigmentazione, coprire l'area con una resina dentinale o con il composito Vittra APS e procedere con una tecnica di restauro a strati utilizzando Vittra APS Unique.

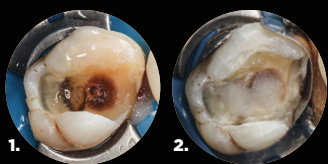

1.

2.



3.



4.

**\*1.** Cavità.

**2.** Rivestimento della parete della polpa con cementi ionomeri vetrosi.

**3.** Tre strati di composito Vittra APS Unique.

**4.** Restauro finalizzato dopo la lucidatura e l'idratazione.

- Cavità di classe III e IV (senza una parete posteriore a supporto della tonalità): eseguire uno strato che fungerà da sfondo per il restauro e finire il volume restante con strati di Vittra APS Unique.



1.

2.

3.

**\*1.** Cavità.

**2.** Composito di sfondo.

**3.** Restauro finalizzato con Vittra APS Unique.



### SUGGERIMENTO: UTILIZZO DI UN COMPOSITO DI SFONDO

In assenza di una parete di sfondo da copiare o in presenza di una modifica di tonalità del substrato dentale, ad esempio una pigmentazione eccessiva dovuta alla formazione di dentina terziaria, macchiatura da amalgama o altro di origine sconosciuta, è necessario utilizzare il composito di sfondo quale supporto della tonalità per Vittra APS Unique.

**RISULTATI ECCELLENTI CON GLI ADESIVI ALTAMENTE ESTETICI AMBAR UNIVERSAL APS E AMBAR APS**



PERCHÉ UTILIZZARE  
VITTRA APS UNIQUE:

# UN COMPOSITO, MOLTE POSSIBILITÀ!

**Restauro di dente anteriore e  
chiusura di diastema**



*Dr. Rodrigo Reis*




**Dentista pediatrico**



*Dr. Dayse Amaral*



**Utilizzo con allineatori invisibili**

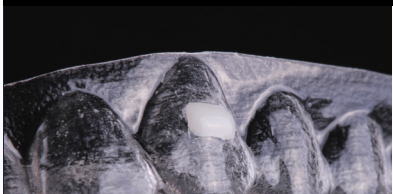


*Dr. Thiago Roberto Gemeli*



**Restauro di dente posteriore**



*Dr. Claudio Sato and Dr. Adriano Sapata*

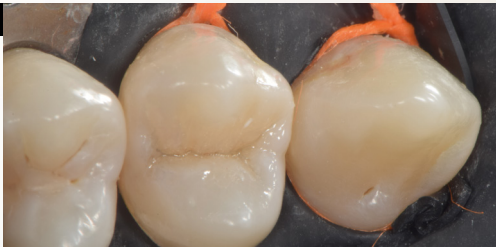

**Restauro su impianto**



*Dr. Augusto Bessa*



## USATO E TESTATO

Loro hanno già utilizzato Vittra APS Unique e assicurano: eccellente imitazione, risultati sorprendenti, procedure più semplici e rapide, riduzione delle giacenze, costo inferiore per il dentista e, naturalmente, risultati estetici garantiti per il paziente.



“Un composito per casi clinici che richiedono agilità, risparmio sulle giacenze e ottimizzazione dei tempi clinici, con un risultato estetico interessante senza compromissione della qualità del proprio lavoro.”

*Dr. Claudio Sato and Dr. Adriano Sapata*

“Secondo me, Vittra APS Unique è stata la più grande scoperta del 2020. La notevole capacità di imitazione del composito è di aiuto in molte situazioni. Nella mia routine clinica e nei miei corsi, dimostro il suo utilizzo nei casi di restauri, chiusura di diastemi, aumenti incisali, ri-anatomizzazioni e persino in odontoiatria pediatrica.”



*Dr. Glauco Menezes*



“Per semplificare con qualità! Vittra APS Unique è uno dei rari prodotti che consente al medico di ridurre i passaggi e di ottenere sempre la giusta tonalità dei propri restauri! Vittra APS Unique è unico.”

*Dr. Dayse Amaral*



**SCANSIONE  
DEL CODICE QR**

Puntare la fotocamera del telefono sul Codice QR per ulteriori informazioni.

