




Whiteness HP Automixx **35% PLUS**

Peróxido de hidrogênio a 35%.

O automistura
mais **completo,
prático e seguro**

25 MINUTOS¹

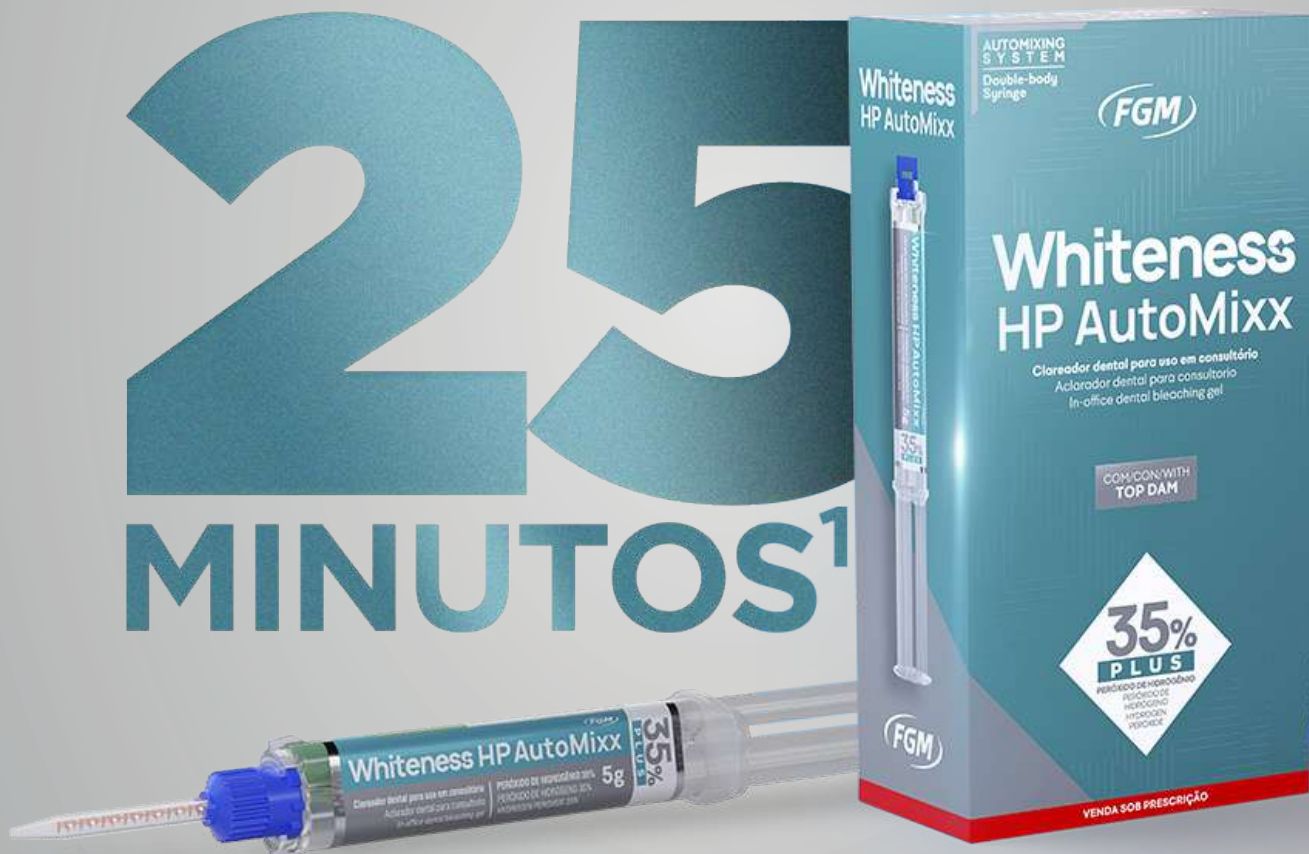

* Venda sob prescrição.

¹Centenaro et al., J Dent., 2025.

FGM ESTHETICS



Whiteness HP Automixx 35% PLUS

Gel clareador à base de peróxido de hidrogênio a 35%, desenvolvido para o clareamento dental. Indicado exclusivamente para uso em consultório odontológico, requer a utilização de isolamento eficiente para assegurar a proteção dos tecidos intraorais e promover um procedimento seguro e eficaz.



pH alcalino e estável:
previne a sensibilidade dental.



Presença de cálcio:
proporciona ação remineralizante.



Alto rendimento:
rende até 4 aplicações (arcadas superior e inferior).



Ponta misturadora:
praticidade que permite aplicação direta.




Bloqueador de calor:
evita o superaquecimento dental quando utilizadas fontes luminosas.



Praticidade e rapidez:
aplicação única de até 50 minutos em contato com os dentes por sessão, sem necessidade de troca.

SEGURANÇA PARA O PACIENTE

Gráfico 1. Variação do pH do Whiteness HP AutoMixx Plus 35% ao longo de 50 minutos de aplicação.

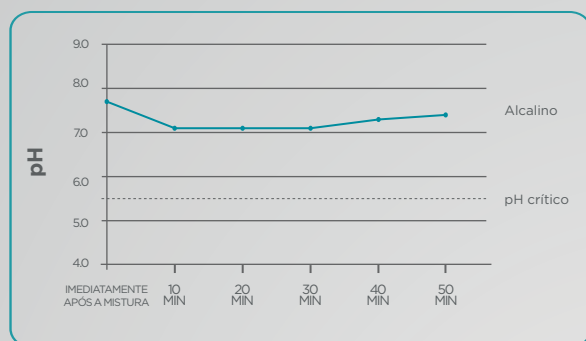


Com pH neutro a alcalino e estável durante os 50 minutos de uso, **Whiteness HP AutoMixx 35% Plus** oferece desempenho consistente e maior confiança para o clareamento em consultório.

Fonte: Garreto Cantanhede L, Favoreto MW, Moreira PH, Corrêa Filho CA, Loguerio AD, de Siqueira FSF, Cardenas AFM. Effect of different pH levels of in-office bleaching gels on teeth with orthodontic brackets bonded using two adhesive strategies: An in vitro comparative study. Int Orthod. 2026 Jun 5;24(3S):101194.

SAÚDE E INTEGRIDADE PULPAR

Gráfico 2. Penetração de peróxido de hidrogênio na câmara pulpar após o clareamento.

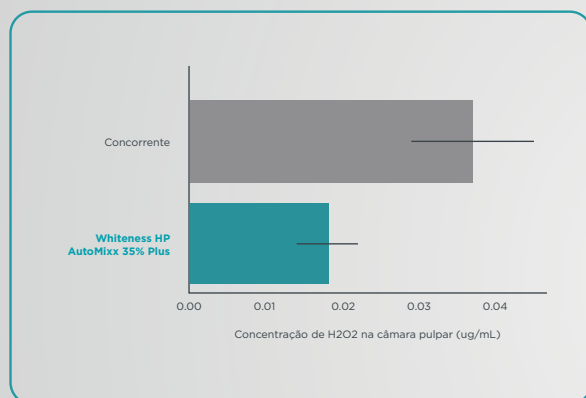


Whiteness HP AutoMixx 35% Plus demonstrou menor difusão de peróxido de hidrogênio para a câmara pulpar, associando estabilidade de pH à manutenção da eficácia clareadora.

Fonte: Garreto Cantanhede L, Favoreto MW, Moreira PH, Corrêa Filho CA, Loguerio AD, de Siqueira FSF, Cardenas AFM. Effect of different pH levels of in-office bleaching gels on teeth with orthodontic brackets bonded using two adhesive strategies: An in vitro comparative study. Int Orthod. 2026 Jun 5;24(3S):101194.

EFICÁCIA CLAREADORA EM UMA ÚNICA APLICAÇÃO


Gráfico 3. Alteração de cor obtida após o tratamento.

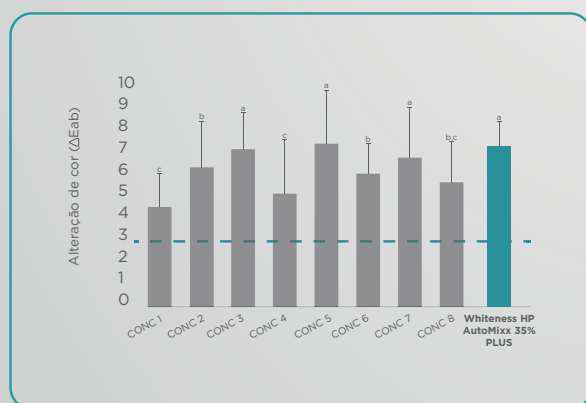

Whiteness HP AutoMixx 35% Plus entrega resultados clareadores expressivos em sessão única, combinando alta eficácia com a praticidade de uma única aplicação clínica.

Fonte: da Silva KL, Favoreto MW, Centenaro GG, Bernardi LG, Borges CPF, Reis A, Loguerio AD. Can all highly concentrated in-office bleaching gels be used as a single-application? Clin Oral Investig. 2023 Jul;27(7):3663-3671.

Saiba mais:

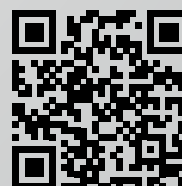




Whiteness HP Automixx **35% PLUS**

Menos tempo na cadeira.
Resultados surpreendentes!

RESULTADOS EM
25 MINUTOS 

Estudo clínico com **Whiteness HP AutoMixx 35%Plus** comparou dois tempos de aplicação: **25min vs 50min**

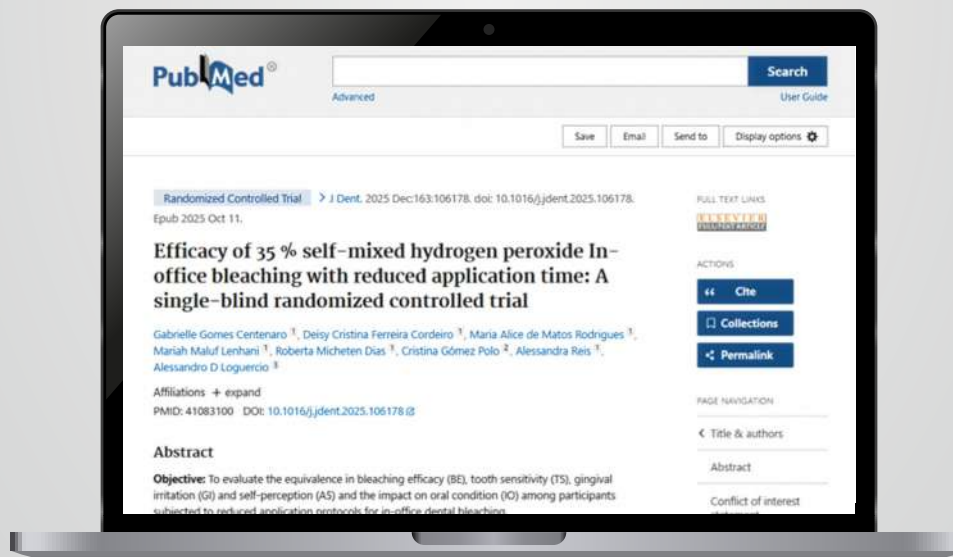

Em metade do tempo, o protocolo de 25 minutos obteve eficácia clareadora semelhante à de 50 minutos.

CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO COM WHITENESS HP AUTOMIXX 35% PLUS

Autora: Dra. Natália dos Santos.



1 | Aspecto inicial. **2** | Aplicação da barreira gengival Top dam.



3 | Gel clareador em ação sobre a superfície do dente. **4** | Polimento com Diamond Excel.

CONFIRA O RESULTADO!



5 | Sorriso inicial. **6** | Sorriso final.

CONHEÇA TAMBÉM:



Whiteness

A marca líder e *mais completa do mercado.*

Mais de **200** *comprovações científicas.*

Mais de 3,5 milhões de clareamentos Whiteness por ano no mundo.



FGM ESTHETICS

fgmdentalgroup.com

* Venda sob prescrição.