



Vittra^{APD}

CORES BLEACH



Estética superior para realçar sorrisos com naturalidade



Vittra^{APS}

CORES BLEACH

O sistema Vittra APS oferece uma linha exclusiva dedicada à restauração de dentes claros, as resinas **Vittra APS nas cores Bleach**.

Suas propriedades estéticas aliadas à **exclusiva Tecnologia APS** proporcionam equilíbrio óptico, resistência mecânica e funcionalidade clínica.

Mais do que cor: um sistema restaurador pensado para mimetizar luz, textura e a translucidez dos dentes claros.

Estética em harmonia com naturalidade • Translucidez equilibrada • Alto brilho



Foto: Dra Alana Blanc



Vittra^{APS}

CORES BLEACH

Ciência, inovação e estética aliadas
às melhores propriedades



Fotopolimerização
avançada.



4X MAIS

TEMPO PARA ESCULPIR*

Estratifique restaurações sem
preocupação. Vittra APS possibilita maior
tempo de trabalho sob a luz do refletor.

SILICATO

DE ZIRCÔNIA
ESFEROIDAL

Maior resistência ao
desgaste e manutenção
da lisura superficial.



Saúde do seu
paciente protegida.

FÓRMULA
AVANÇADA


BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS




Sistema de cores

Vittra APS Bleach foi desenvolvida para oferecer a máxima versatilidade em restaurações claras. Seu sistema de **3 tonalidades**, disponíveis nas opacidades de **esmalte** e **dentina**, permite realizar restaurações com aspecto desde o branco natural até o extraluminoso com facilidade.

A solução ideal para criar sorrisos claros com a segurança de um resultado estético e previsível.

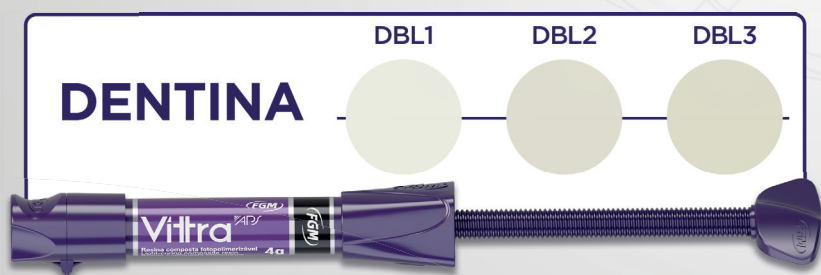

Aplicação: Camadas profundas em fina ou alta espessura. É a base do croma e define a percepção final da cor do dente.

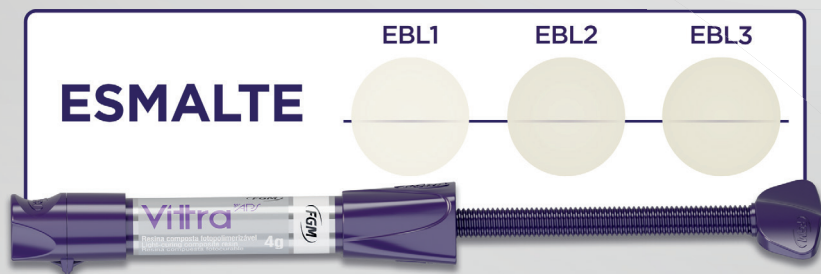

Aplicação: Camadas superficiais em fina espessura. Mimetizam a translucidez natural do dente e interferem diretamente em como a luz é refletida ou absorvida, influenciando na percepção de luminosidade do dente.

Parâmetros de cor

OPACIDADE

EBL1, EBL2 e EBL3



DBL1, DBL2 e DBL3



VALOR


EBL1 e DBL1



EBL2 e DBL2




EBL3 e DBL3

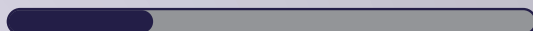

CROMA

EBL1 e DBL1

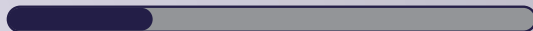

EBL2 e DBL2



EBL3 e DBL3





Vittra^{APS}

CORES BLEACH

Propriedades mecânicas



Figura 1: Resistência à flexão em três pontos (média e desvio padrão em MPa) de diferentes compósitos (n=10) (ANOVA de 1 fator e teste de Tukey; $p<0,05$).

Fonte: Carvalho E, Bauer M, Pailover P, Malaquias P, Gutierrez F, Reis A, Bauer J, Loguercio A. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Universidade Federal do Maranhão, 2016.

O resultado demonstra que Vittra APS apresentou excelente resistência à flexão, comparável ou superior a produtos já conhecidos no mercado.

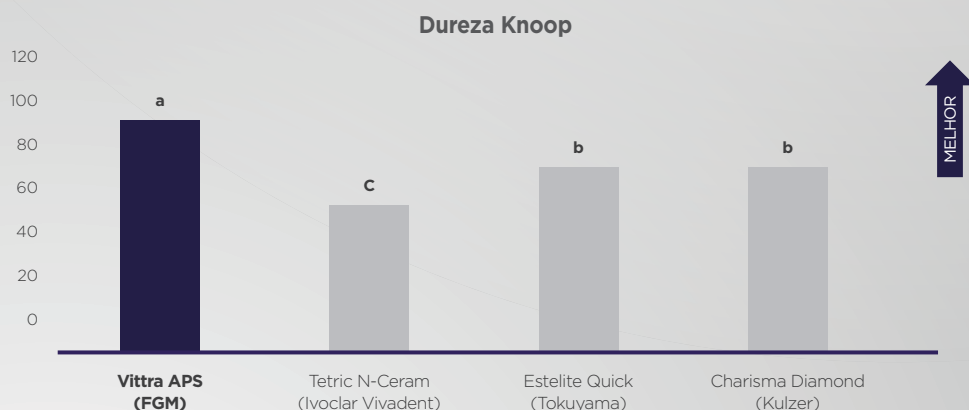


Figura 5: Dureza Knoop (média e desvio padrão em KHN) de diferentes compósitos (n=5) (ANOVA de 1 fator e teste de Tukey; $p<0,05$).

Fonte: Carvalho E, Gutierrez F, Bauer M, Pailover P, Malaquias P, Reis A, Bauer J, Loguercio A. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Universidade Federal do Maranhão, 2016.

Vittra APS apresentou a maior dureza superficial dentre os compósitos participantes do ensaio, demonstrando valores que surpreendem. Tal dureza tem origem na qualidade, morfologia e teor das cargas utilizadas, bem como na qualidade do polímero formado e sua interação com tais cargas.

Caso clínico

Prof^a. Dra. Alana Blanc



1
Aspecto inicial.



2
Condicionamento ácido com Condac 37 e aplicação do adesivo Ambar APS.



3
Estratificação da camada palatina, à mão livre, com uma resina composta de alto nível de translucidez, **Vittra APS Trans N**.



4
Camada de dentina com **Vittra APS na cor bleach DBL3**. Atenção especial aos efeitos de mamelos dentinários.



5
Vittra APS DBL3 aplicada em um fino rolete na borda incisal para imitar o halo opaco.



6
Cobertura final vestibular feita em camada única de resina de esmalte bleach, **Vittra APS EBL3**.



Resultado final.



Prof^a. Dra. Alana Blanc

"O sistema de resinas Vittra APS conta com uma escala de cores Bleach que considero essencial para atender as demandas de pacientes com alta exigência estética. A esculpibilidade e manipulação estão incríveis! O que mais gosto é poder contar com a opacidade das dentinas e uma translucidez super natural dos esmaltes clareados. Consigo entregar um sorriso branco com um toque de naturalidade!"

Caso clínico

Prof. Dr. Renato Voss Rosa



1
Aspecto inicial.



2
Clareamento prévio pela técnica caseira e de consultório.



3
Concha palatina confeccionada com resina **Vittra APS Trans N**.



4
Dentina de volume e mamelos confeccionados com **Vittra APS DA1**.



5
Preenchimento e volume incisal com a cor T da linha Opallis Flow.



6
Incremento final de esmalte vestibular com a cor **EBL3 da resina Vittra APS**.



Resultado final.



Prof. Dr. Renato Voss Rosa

*"Tenho utilizado a resina composta **Vittra APS Bleach** em meus atendimentos e os resultados têm sido bastante positivos. A cor se adapta muito bem aos casos, proporcionando naturalidade estética. O polimento tem sido também um ponto forte desse material, garantindo brilho e longevidade ao resultado final. Uma resina que realmente agrega segurança e previsibilidade clínica."*

Caso clínico

Prof. Dr. Leonardo Muniz



1

Aspecto inicial.



2

Confecção da camada palatina com **Vittra APS EBL1**.



3

Aplicação de dentina **Vittra APS DA1** nas faces vestibulares.



4

Aplicação de esmalte **Vittra APS EA1** no terço cervical e esmalte **Vittra APS EBL3** no terço médio.



5

Aplicação de resina translúcida **Vittra APS Trans N** nas regiões incisais.



6

Resultado intraoral.



Resultado final.



Prof. Dr. Leonardo Muniz

*"Tenho usado bastante as cores Bleach da Vittra APS, em especial a **EBL3** se destaca por sua naturalidade mantendo um polimento incrível."*

ASSOCIE O CLAREAMENTO DENTAL PREVIAMENTE AO PROTOCOLO RESTAURADOR



Whiteness



**7X
PREMIADO**
O MELHOR CLAREADOR
DENTAL DE USO CASEIRO
NOS EUA 🇺🇸



Para casos em que o objetivo final é um sorriso mais claro, o clareamento dental, realizado previamente à etapa restauradora, é um recurso estratégico e conservador que potencializa a excelência do resultado estético final. Confira as vantagens:

Técnica restauradora mais conservadora

Menos camadas de resina são necessárias para modificar a cor dos dentes, ocasionando em um procedimento menos invasivo, que preserva a estrutura dentária saudável.

Resultados naturais

Com substrato de cor mais favorável, é possível replicar melhor a translucidez do esmalte e a profundidade da dentina, resultando em restaurações que se fundem visualmente à estrutura dentária e favorecem resultados mais naturais.

Otimização do tempo clínico

O resultado do clareamento define a cor final da arcada. Com essa informação, a seleção da resina composta se torna mais objetiva e previsível, reduzindo o tempo de cadeira necessário para a escolha e a adaptação de cor.

Whiteness e Vittra APS Bleach: a combinação perfeita para resultados altamente estéticos.

Apresentação comercial

Cores Bleach



Refil 4g

Dentina: DBL1, DBL2 e DBL3

Esmalte: EBL1, EBL2 e EBL3



Kit Bleach I

DBL1 e EBL1 em seringas de 4g, Trans N e Trans OPL em seringas de 2g e Ambar APS 6ml.



Kit Bleach II

DBL2 e EBL2 em seringas de 4g, Trans N e Trans OPL em seringas de 2g e Ambar APS 6ml.



ESTHETICS



Verifique as certificações aplicáveis aos produtos

fgmdentalgroup.com

 [fgmodonto](#)

 [fgmdentalgroup](#)

 [FGM Dental Group](#)